

**SenSura® Mio**

**Coloplast**

**SenSura® Mio Convex**

1-teilig geschlossene

Stomaversorgung



Coloplast A/S  
Høtveddam 1  
3050 Humlebaek  
Denmark

**Gebrauchsanweisung**

23324352 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten.©

2020-08-25

**Bestimmungsgemäße Verwendung**

Die Stomaversorgung ist dafür bestimmt, Ausscheidungen aus einem Stoma passiv aufzunehmen. Die Hautschutz-Basisplatte wird an der Stomaversorgung befestigt und ist dafür bestimmt, an der intakten Haut rund um das Stoma zu haften.

**Indikationen**

Das Produkt ist für Menschen mit einem Stoma indiziert.

**Warnhinweise**

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Die Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und somit ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

**Vorsichtsmaßnahmen**

Konsultieren Sie vor dem ersten Einsatz eines konvexen Produkts Ihre medizinische Fachkraft in Bezug auf seine richtige Anwendung.

**Information**

Stomaversorgung zum Einmalgebrauch.

Die Produkte sind bis zur Entnahme zur Verwendung im Karton aufzubewahren, da der Karton die Produkte schützt und das Kartonetikett wichtige Informationen wie Chargennummer, Verfallsdatum sowie einen eindeutigen Strichcode enthält.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.

Coloplast schließt jede Haftung für Verletzungen oder Schäden aus, die aus einer, anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.


**Besondere Lagerungsbedingungen**

Lagern Sie das Produkt in horizontaler Position.

Vor Sonnenlicht schützen.

**Anwendung**

**Vorbereitung**

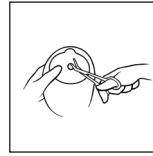

Anschließend eine Öffnung in Größe und Form des Stomas ausschneiden. Zum Ausschneiden empfiehlt sich eine gebogene Schere.  
Größe und Form des Stomas auf der Stomaschablone mit einem Stift markieren.  
Um Undichtigkeiten und Hautprobleme zu vermeiden, muss die Öffnung in der Haftfläche exakt um das Stoma herum abschließen.




Das Stoma und die Stoma umgebende Haut gründlich reinigen. Vor dem Anbringen der Basisplatte muss die Haut sauber und trocken sein.

**Anwendung**



Um die Schutzfolie zu entfernen, mit Daumen und Zeigefinger der einen Hand die Lasche an der Haftfläche festhalten und mit der anderen Hand die Schutzfolie von der Haftfläche abziehen.

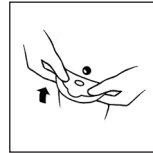


Richten Sie den Hautschutz rund um das Stoma aus und drücken Sie ihn fest an die Haut.  
Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anliegen. Um Leckagen zu vermeiden, muss auf eine gute Abdichtung rund um das Stoma geachtet werden.

Beim Andrücken des Hautschutzes/ des Beutels an die Bauchdecke sollten Sie im Bereich nah am Stoma beginnen und den Hautschutz fest an die Haut drücken. Fahren Sie mit dem Finger um das gesamte Stoma herum entlang, um sicherzustellen, dass der Hautschutz dicht anliegt. Glätten Sie den Hautschutz vom Stoma weg nach außen bis zum Rand, um sicherzustellen, dass der Hautschutz vollen Kontakt zur Haut hat.



Die Versorgung von unten nach oben fest auf die Haut drücken, um ein rasches Haften und einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

**Entfernung**

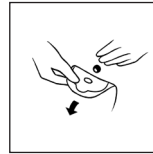


Die Abziehlasche des Hautschutzes mit zwei Fingern festhalten und den Beutel sanft von der Haut abrollen. Gleichzeitig mit der freien Hand die Haut gespannt halten und etwas Gegendruck auf die Haut auf dem Bauch ausüben.

**Entsorgung**


Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch vorgesehen und sollte im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt nicht in die Toilette werfen.

**Filterabdeckung**

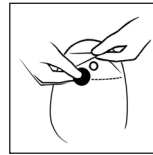

Falls erforderlich, eine der beiliegenden Filterabdeckungen auf dem Filter anbringen, um ein Entweichen von Gas zu verhindern.

**Gürtel**

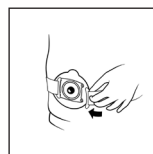

Den Gürtel durch Festziehen der Gurte auf den individuellen Körperumfang anpassen. Jeden der vier Gürtelösen an einen der vier Befestigungspunkte der Basisplatte befestigen. Von Vorne beginnen und dabei einen leichten Druck in Richtung Bauch ausüben. Die Gürtelhaken von der Kopplung wegziehen, bis diese mit einem Klicken einrasten.

(Gilt nur für Produkte mit Gürtelschlaufen.)

## Meldung von Vorfällen

Falls es während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts zu einem schwerwiegenden Vorkommnis gekommen ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

## Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für  
Medizinprodukte



Katalognummer



Verfallsdatum (TT.MM.JJJJ)



Chargennummer



Herstellungsdatum (TT.MM.JJJJ)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Zeigt den Barcode mit der einheitlichen  
Produktkennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device  
Identification, UDI) an



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Hier oben



Recyclingfähige Verpackung



MR-sicher