

Selbsthaftend



Gebrauchsanweisung

23327018 Version 1

Das Coloplast-Logo ist eine eingetragene Marke der Coloplast A/S. Alle Rechte vorbehalten. © 2021-03-01

Verwendungszweck

Kondom-Urinale dienen dem Ablassen von Urin, normalerweise in einen Urinbeutel.

Indikationen

Kondom-Urinale sind für männliche Patienten indiziert, die an Harninkontinenz leiden.

Warnhinweise

Eine Wiederverwendung dieses Produkts für den Einmalgebrauch wird aufgrund des Risikos von Kreuzkontamination nicht empfohlen.

Wiederaufbereitung, Reinigung, Desinfektion, und/oder (Re-)Sterilisation können die Produktmerkmale beeinträchtigen und dadurch ein zusätzliches Risiko einer körperlichen Schädigung oder Infektion des Anwenders darstellen.

Informationen

Dieses Produkt ist für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Das Kondom-Urinal ist selbsthaftend.

Das Produkt muss vor einer MRT-Untersuchung nicht abgenommen werden, da es MR-sicher ist.


Das Produkt ist ohne Naturkautschuklatex hergestellt, jedoch kann es in seltenen Fällen beim Herstellungs- oder Verpackungsprozess zu einer Kontamination mit Spuren von Naturkautschuklatex kommen.

Nur zusammen mit Hautpräparaten auf Alkoholbasis verwenden, wenn diese vollständig getrocknet sind. Restalkohol kann zu Materialzersetzung oder einer zu starken Haftung auf der Haut führen.

Nicht mit Cremes oder Puder verwenden. Die effiziente Haftung des Kondom-Urinals könnte durch Verwendung dieser Produkte beeinträchtigt werden.

Coloplast übernimmt keine Haftung für jegliche Verletzungen oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die aus einer anderen als der den aktuellen Empfehlungen von Coloplast entsprechenden Verwendung dieses Produkts entstehen.

Vorbereitung

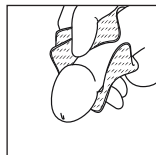

Schamhaar bei Bedarf kürzen.
Den Penis mit Wasser und Seife waschen. Gründlich trocknen.


Applikation

Beim Überstreifen des Produkts die Vorhaut über dem Peniskopf belassen, damit das Produkt sich nicht in der losen Haut verwickelt oder daran zieht. Diese Anweisung gilt für unbeschnittene Männer. Sie trifft nicht auf beschnittene Männer zu.




Das zusammengerollte Kondom-Urinal mit dem schmälere Ende vom Körper weg zeigend über den Peniskopf streifen. Einen Hohlraum von 1–2 cm zwischen Penisspitze und dem schmalen Auslassschlauch lassen, damit der Urin unbehindert ablaufen kann. Das Produkt langsam bis zur vollen Länge bzw. bis zur vollen Länge des Penis aufrollen.

Halten Sie das Kondom-Urinal mit einer Hand in Position und ziehen Sie mit der anderen die Ausrollschleife aus.

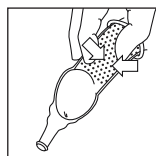


Das heruntergerollte Kondom-Urinal/den Katheter sanft um den Penis herum zusammendrücken, um sicherzustellen, dass das Kondom sicher auf der Haut haften bleibt und sämtliche Undichtigkeiten durch Falten abgedichtet werden. Es ist kein zusätzliches Haftmittel erforderlich.

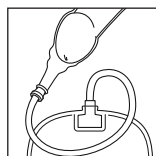

Das Produkt an einen Urinsammelbeutel anschließen.

Das Urinsammelsystem ist nun funktionsfähig.

Entfernung

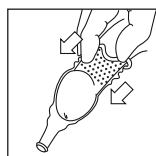

Das Produkt vom Urinsammelbeutel trennen.

Das Kondom-Urinal/den Katheter unten anfassen und sanft nach vorne rollen.

Entsorgung



Den Beutel gemäß den örtlichen Richtlinien und Empfehlungen wechseln. Keines der Produkte sollte länger als 24 Stunden getragen werden.

Hautpflege: Nach Möglichkeit die Haut zwischen dem Produktwechsel für einen kurzen Zeitraum frei atmen lassen.

Das Produkt ist nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und sollte gemäß den örtlichen Richtlinien, z. B. zusammen mit dem normalen Hausmüll, entsorgt werden.

Das Produkt nicht in der Toilette entsorgen.

Meldung von Vorkommnissen

Falls während der bzw. durch die Anwendung dieses Produkts ein schwerwiegendes Vorkommnis aufgetreten ist, melden Sie dieses bitte dem Hersteller und der zuständigen nationalen Behörde.

Symbolerklärung



Medizinprodukt



Einhaltung der europäischen Bestimmungen für Medizinprodukte



Katalognummer



Verfalldatum (JJJJ-MM-TT)



Chargennummer / LOT-Nummer



Herstellungsdatum (JJJJ-MM-TT)



Hersteller



Gebrauchsanweisung befolgen



Nur für den einmaligen Gebrauch



Ohne Naturkautschuklatex hergestellt



Zeigt an, dass ein Barcode eine Unique Device Identification (UDI) enthält



(Global Trade Item Number) Globale Artikelnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Recyclingfähige Verpackung



MR-sicher